

# aks-profiplot n



**Antidekubitus - Weichlagerungsmatratze**

## Gebrauchsanweisung

(Original Gebrauchsanweisung)



Stand:2012-09



**aks**  
aktuelle krankpflege systeme

Antwerpener Straße 6  
53842 Troisdorf  
Fon: 02241 9474-0  
Fax: 02241 9474-88  
E-mail: aks@aks.de  
Web: www.aks.de



## INHALTSVERZEICHNIS

<b>1</b>	<b>Einleitung</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>4</b>
2.1	Indikation	4
2.2	Anwendungsbereich	4
<b>3</b>	<b>Allgemeine Sicherheitshinweise</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Lieferumfang</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Zubehör / Option</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>Produktbeschreibung</b>	<b>7</b>
6.1	Produktübersicht	7
6.2	Funktionsbeschreibung	8
<b>7</b>	<b>Anwendung</b>	<b>9</b>
7.1	Vorbereitung vor der Anwendung	9
7.2	Lagerung des Patienten	10
7.3	Aufziehen der aks-inkoair® Matratzenhülle (optional)	10
<b>8</b>	<b>Pflege / Reinigung</b>	<b>11</b>
<b>9</b>	<b>Lagerung</b>	<b>12</b>
<b>10</b>	<b>Wiedereinsatz</b>	<b>12</b>
<b>11</b>	<b>Entsorgung</b>	<b>12</b>
<b>12</b>	<b>Lebensdauer</b>	<b>13</b>
<b>13</b>	<b>Garantie</b>	<b>13</b>
<b>14</b>	<b>Konformitätserklärung</b>	<b>13</b>
<b>15</b>	<b>Technische Daten</b>	<b>14</b>
<b>16</b>	<b>Checkliste für den Wiedereinsatz</b>	<b>15</b>

## 1 Einleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf unserer Schaumstoff-Weichlagerungsmatratze aks-profiplot n entschieden haben.

Die aks-profiplot n wurde ausschließlich zur Dekubitusprophylaxe entwickelt.

Sie zeichnet sich unter anderem durch folgende Merkmale aus:

- Matratzenkern aus FCKW-frei geschäumten Kaltschaum
- Konturschnitte in Form von 8 Längsschnitten auf der Oberfläche
- Abnehmbarer Trikotbezug über dem Matratzenkern

**Lesen und beachten Sie vor jedem Einsatz diese Gebrauchsanweisung, sie vermittelt Ihnen die notwendigen Informationen zur sicheren Anwendung!**

**Heben Sie die Gebrauchsanweisung zum Nachlesen griffbereit auf!**

**Bitte geben Sie bei einem Besitzerwechsel diese Gebrauchsanweisung mit!**

## 2 Zweckbestimmung

### 2.1 Indikation

Die Weichlagerungsmatratze aks-profiplot n ist ausschließlich für die Dekubitusprophylaxe einsetzbar. Für die Dekubitustherapie darf die aks-profiplot n nicht eingesetzt werden.

### 2.2 Anwendungsbereich

Die aks-profiplot n ist ein Medizinprodukt der Klasse I, das zur Verhütung von Dekubitalgeschwüren bestimmt ist. Es ist für eine langzeitige Anwendung unter normalen Bedingungen vorgesehen.

Die Weichlagerungsmatratze ist für Menschen bestimmt, bei denen aufgrund ihrer Krankheit, Behinderung oder aufgrund des Alters ein überwiegendes bzw. dauerhaftes Liegen notwendig ist.

Die aks-profiplot n ist für den Einsatz im häuslichen Bereich sowie für den Einsatz in Alten- und Pflegeheimen geeignet.

Die Weichlagerungsmatratze ist für die Anwendung in einem Pflegebett oder sonstigem „Standardbett“ einsetzbar. Das Bett muss eine stabile, ebene Liegefläche haben, die mit den Außenmaßen der aks-profiplot n übereinstimmen. Die Liegefläche darf keine scharfen Ecken und Kanten aufweisen, die die Matratze beschädigen können. Außerdem ist darauf zu achten, dass das Bett über Matratzenhalter oder eine Rahmenkonstruktion verfügt, die ein Herausrutschen der aks-profiplot n verhindern.

Die aks-profiplot n kann auf allen Lattenrosten und Gitterliegeflächen, verstellbar oder starr, eingesetzt werden, wobei die optimale Wirkung bei einer ebenen Lage der Antidekubitusmatratze erreicht wird.

Es dürfen Patienten mit einem Gewicht von 40 kg bis maximal 135 kg auf der aks-profiplot n gelagert werden.

Die aks-profiplot n ist nicht für den Wiedereinsatz vorgesehen.

Ein Wiedereinsatz ist nur möglich, wenn ab dem Ersteinsatz die aks-profiplot n zusammen mit der optional erhältlichen aks-inkoair® Matratzenhülle verwendet wurde.

Vor dem Wiedereinsatz (z.B. bei einem Patientenwechsel) sind die Matratze, der Trikotbezug und die aks-inkoair® Matratzenhülle nach einem validiertem Verfahren aufzubereiten sowie anhand der Checkliste für den Wiedereinsatz (siehe Kapitel 16) zu prüfen.

Die aks-profiplot n ist nur für trockene Räume geeignet. Die klimatischen Bedingungen sollten bei einer Umgebungstemperatur von 10°C bis 40°C und einer Luftfeuchtigkeit von 20% bis 75% liegen.

## 3 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lesen Sie vor jedem Erst- und Wiedereinsatz vollständig die Gebrauchsanweisung, um Schäden oder Gefährdungen durch eine Fehlanwendung zu vermeiden. Sie enthält wichtige Informationen und Hinweise, die für die sachgerechte Anwendung der aks-profiplot n notwendig sind.
- Der Anwender (Pflegepersonal) muss die entsprechende Sachkenntnis besitzen, um die Eignung des Produktes überprüfen, das Dekubitusrisiko richtig beurteilen und um eine adäquate Weichlagerung des Patienten durchführen zu können.
- Die aks-profiplot n ist nur entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen. Die Gebrauchsanweisung ist für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren. Legen Sie bei einem Besitzerwechsel diese Gebrauchsanweisung der aks-profiplot n bei.
- Überzeugen Sie sich anhand der Checkliste (siehe **Kapitel 16 Checkliste für den Wiedereinsatz**) vor jeder Benutzung vom ordnungsgemäßen, fehlerfreien Zustand der aks-profiplot n.
- Schützen Sie die Weichlagerungsmatratze vor offenem Feuer (z.B. Kamin, Zigarettenglut, Kerze), vor direkter Sonneneinstrahlung und vor sonstigen Hitzeeinwirkungen (z.B. durch Heizdecken). Es besteht Brandgefahr!
- Schützen Sie die aks-profiplot n vor spitzen und scharfkantigen Gegenständen und Oberflächen. Es besteht die Gefahr der Beschädigung!
- Bei Verwendung der aks-profiplot n in einem Bett mit Seitengittern ist zu überprüfen, ob für den Patienten Einklemm-/Einquetschrisiken oder die Gefahr des Herausfallens bestehen. Achten Sie beim Einsatz der Weichlagerungsmatratze und der Verwendung von Seitengittern auf eine ausreichende Seitengitterhöhe. Diese muss ab der Matratzenoberseite bis zur Oberkante des Seitengitters mindestens 220 mm betragen. Verwenden Sie andernfalls eine Seitengittererhöhung.
- Bei einer bestehenden Urin- und/oder Stuhlinkontinenz muss ein Inkontinenzmatratzenschutz wie die aks-inkoair® Matratzenhülle verwendet werden, um die aks-profiplot n vor infektiösen Verunreinigungen zu schützen.
- Es darf ein zulässiges Patientengewicht von 40 kg nicht unterschritten und das maximale Patientengewicht von 135 kg nicht überschritten werden.
- Beachten Sie bei längerer Nichtbenutzung die Lagerbedingungen im Kapitel **9 Lagerung**.

## 4 Lieferumfang

Die aks-profiplot n wurde bereits im Werk auf Fehlerfreiheit und Vollständigkeit überprüft. Prüfen Sie dennoch das Produkt sofort nach Erhalt auf Vollständigkeit und eventuelle, während des Transportes, aufgetretene Schäden. Der Lieferumfang besteht standardmäßig aus:

- 1x Antidekubitus-Weichlagerungsmatratze aus Kaltschaumstoff aks-profiplot n
- 1x Trikotbezug
- 1x Gebrauchsanweisung

Die aks-profiplot n ist in folgenden Varianten lieferbar:

aks-profiplot n	Bestellnummer
90 x 190 x 12 cm	39101
90 x 200 x 12 cm	39055
100 x 200 x 12 cm	39102

## 5 Zubehör / Option

Als Zubehör / Option ist für die aks-profiplot n die aks-inkoair® Matratzenhülle als Inkontinenzschutz erhältlich.

Verwenden Sie als Zubehör ausschließlich original aks-Zubehörteile, denn nur diese sind von uns geprüft und gewährleisten eine einwandfreie und sichere Funktion.

Entnehmen Sie die verfügbaren Größen und die zugehörigen Bestellnummern der aks-inkoair® Matratzenhülle aus der nachfolgenden Tabelle.

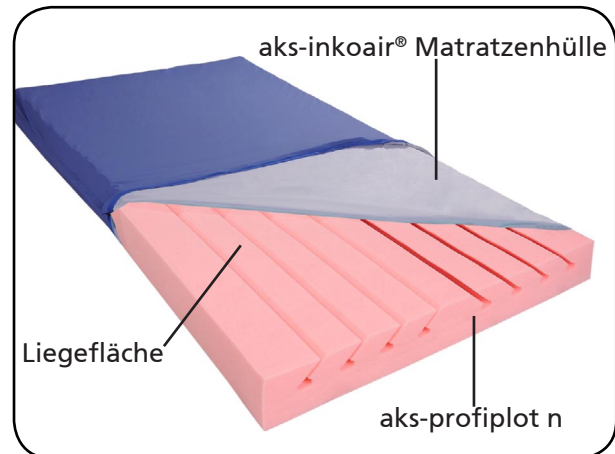


Abbildung 01

aks-inkoair® Matratzenhülle	Bestellnummer
90 x 190 x 12 cm	49042
90 x 200 x 12 cm	49040
100 x 200 x 12 cm	49041

## 6 Produktbeschreibung

### 6.1 Produktübersicht

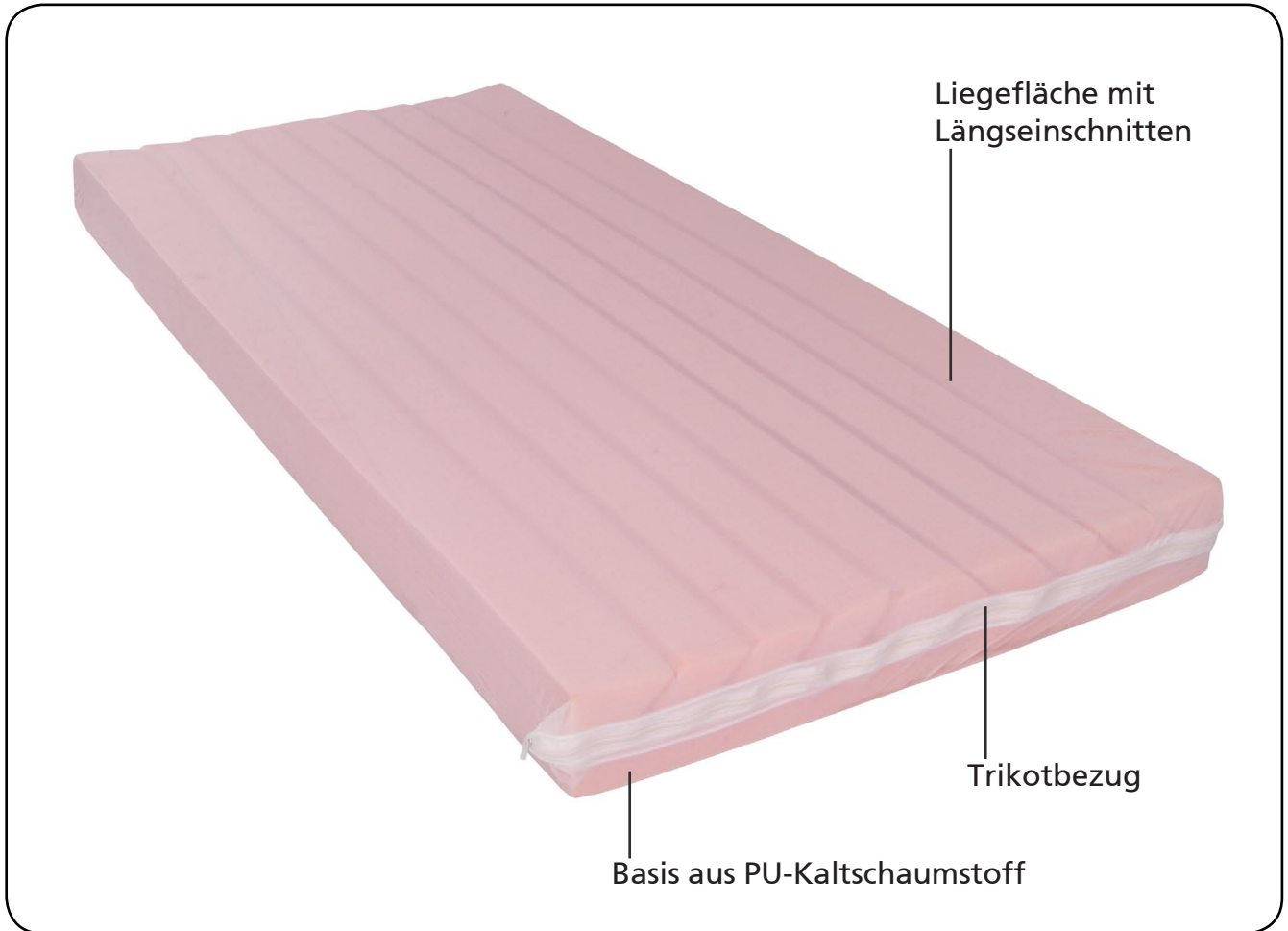


Abbildung 02

## 6.2 Funktionsbeschreibung

Die aks-profiplot n ist eine Schaumstoffmatratze mit einer strukturierten Liegefläche. Sie dient zur Minderung der Scherkräfte und wirkt nach dem Weichlagerungsprinzip. Die aks-profiplot n wird ausschließlich zur Dekubitusprophylaxe am ganzen Körper eingesetzt.

Die aks-profiplot N besteht aus einem 12 cm hohen Schaumstoffkern aus Kaltschaum. In die Oberfläche sind 8 Längseinschnitte mit schräger Schnitttechnik eingebracht, die eine strukturierte Liegefläche ergeben (siehe Abbildung 02).

Die Weichlagerungsmatratze ist mit einem Trikotunterbezug versehen. Die wasserundurchlässige aks-inkoair® Matratzenhülle ist als Option möglich.

Die aks-profiplot n ist in den Größen 90 x 200 x 12 cm, 90 x 190 x 12 cm und 100 x 200 x 12 cm erhältlich.

Die Weichlagerungsmatratze aks-profiplot n wird anstelle einer herkömmlichen Matratze auf den Bettrahmen gelegt und muss dort durch Matratzenhalter bzw. durch die Rahmenkonstruktion fixiert werden.

Die aks-profiplot n ist für ein zulässiges Patientengewicht von 40 kg bis 135 kg ausgelegt.



## 7 Anwendung

### Hinweis:

Für den Betreiber / Anwender von Medizinprodukten ist die Medizinprodukte-Betreiber-Verordnung (MPBetreibV) verbindlich.

Der Anwender muss die entsprechende Sachkenntnis besitzen, um die Eignung des Produktes überprüfen, das Dekubitusrisiko richtig beurteilen und um eine adäquate Weichlagerung des Patienten durchführen zu können.

### 7.1 Vorbereitung vor der Anwendung

Überprüfen Sie die aks-profiplot n vor und während des Aufbaus zur Anwendung auf eventuelle Schäden und Mängel, um sicherzustellen, dass während der Lagerung oder des Transports keine Beschädigungen oder Defekte entstanden sind. Eine beschädigte Weichlagerungsmatratze darf nicht eingesetzt werden.

1. Überprüfen Sie, ob das Bett für die Verwendung mit der aks-profiplot n geeignet ist. Beachten Sie dabei die Anforderungskriterien des Bettes, die im **Kapitel 2 Zweckbestimmung, Abschnitt 2.2** beschrieben sind.
2. Die aks-profiplot n wird gerollt in einer Verpackungsfolie geliefert. Öffnen Sie die Verpackungsfolie an einem Ende und nehmen Sie die Matratze heraus. Achten Sie darauf, dass Sie die aks-profiplot n nicht beschädigen. Bewahren Sie die Verpackungsfolie für einen evtl. Transport bzw. die Lagerung auf.
3. Legen Sie die aks-profiplot n (ohne Bezug) auf die Liegefläche Ihres Bettes und rollen Sie diese vollständig aus.  
Die strukturierte Oberfläche muss sichtbar sein und ist die Liegefläche der Matratze.  
Zwischen Kopf- und Fußseite muss bei der Positionierung der Matratze nicht unterschieden werden.
4. Lassen Sie die aks-profiplot n vor der Anwendung zunächst für ca. 2 Stunden offen liegen, damit sich der Schaumstoff ausreichend entfalten und akklimatisieren kann.
5. Beziehen Sie die Matratze mit einem Bettlaken.  
Bei einer bestehenden Urin- und / oder Stuhlinkontinenz muss die optional erhältliche aks-inkoair® Matratzenhülle verwendet werden.  
Vermeiden Sie beim Aufziehen des Matratzenschutzes eine Faltenbildung.
6. Vergewissern Sie sich noch einmal, dass die aks-profiplot n mit der strukturierten Oberfläche nach oben zeigend auf dem Bett liegt.
7. Sichern Sie die aks-profiplot n auf der Liegefläche Ihres Bettes vor einem möglichen Verrutschen. Klemmen Sie dazu die Matratze zwischen die Matratzenhalter bzw. zwischen die Rahmenkonstruktion.  
Beachten Sie, dass sich die aks-profiplot n dabei nicht staucht und Wölbungen in der Matratze entstehen.

8. Überprüfen Sie zum Schluss die Liegefläche der Matratze auf mögliche Druckstellen durch Faltenbildung und den festen Sitz der aks-profiplot n, bevor Sie den Patienten auf die Matratze legen.

**Achten Sie beim Einsatz der aks-profiplot n auf einem Pflegebett mit Seitengittern darauf, dass die Seitengitterfunktionen vollständig erhalten bleiben.**

## 7.2 Lagerung des Patienten

Nachdem alle Vorbereitungen zur Anwendung gemacht wurden (siehe **Abschnitt 7.1 Vorbereitung vor der Anwendung**), kann der Patient auf der aks-profiplot n gelagert werden.

**Beachten Sie, dass der Einsatz der aks-profiplot n nicht die regelmäßige Umlagerung des Patienten vollständig ersetzt.**

**Beachten Sie, eine dauernde Weichlagerung erbringt immer den Nachteil, dass der Patient sein Körperschema verlieren kann, die Beweglichkeit eingeschränkt wird, und dass es zu einer Reduzierung von Spontanbewegungen kommen kann. Eine aktivierende Pflege wird demzufolge erschwert.**

## 7.3 Aufziehen der aks-inkoair® Matratzenhülle (optional)

Wenn Sie die aks-inkoair® Matratzenhülle nachträglich oder nach dem Waschen auf die aks-profiplot n aufziehen wollen, müssen Sie folgendes beachten:

- Die Schutzüberlappung des Reißverschlusses muss von oben nach unten verlaufen, d.h. Flüssigkeiten dürfen nicht von oben durch den Reißverschluss in die Matratzenhülle eindringen können.
- Vermeiden Sie eine Faltenbildung z.B. durch verschobenes Aufziehen der Matratzenhülle
- Vermeiden Sie zusätzliche Druckstellen durch die Matratzenhülle

## 8 Pflege / Reinigung

Die Herstellung der aks-profiplot n unterliegt höchsten Qualitätsnormen. Damit sich die vom Hersteller angegebenen Eigenschaften nicht verändern, sind folgende Hinweise zu beachten:

- **Allgemein**

Verwenden Sie keine Scheuermittel oder harte Bürsten. Verwenden Sie alkoholfreie und chlorfreie Desinfektionsmittel und nur Verfahren aus der Liste des RKI (Robert-Koch-Institut) oder der Desinfektionsmittelliste des VAH (Verbund für Angewandte Hygiene e.V.).

Beachten Sie die Hinweise und Schutzmaßnahmen der Reinigungs- und Desinfektionsmittelhersteller.

- **Matratze**

Die Matratze kann mit einem milden, alkoholfreien Reinigungsmittel und einem feuchten Lappen durch vorsichtiges Reiben gereinigt werden.

Die Desinfektion der Matratze muss nach einem validierten Verfahren, z.B. durch Autoklavieren erfolgen.

- **Trikotunterbezug**

Der Trikotbezug kann bei max. 95°C in der Waschmaschine unter Verwendung von haushaltsüblichen Waschmitteln gewaschen werden.

Er darf im Trockner unter reduzierter Temperatur getrocknet werden und nicht heiß gebügelt werden. Der Trikotunterbezug darf nicht chemisch gereinigt werden.

- **aks-inkoair® Matratzenhülle (optional)**

Die aks-inkoair® Matratzenhülle kann mit einem milden, alkoholfreien Reinigungsmittel und einem Lappen von Hand gereinigt werden.

Ein Waschen der aks-inkoair® Matratzenhülle ist bei max. 95°C in der Waschmaschine unter Verwendung von haushaltsüblichen Waschmitteln möglich.

Eine alleinige Desinfektion von Hand ist durch ein validiertes Wischdesinfektionsverfahren durchzuführen.

Zur Reinigung und Desinfektion ist ein validiertes, maschinelles Verfahren nach RKI (Robert-Koch-Institut) notwendig. Es ist u.a. ein chemo-thermisches Verfahren nach RKI möglich.

Beachten Sie die Waschanleitung am Etikett.

Die aks-inkoair® Matratzenhülle darf nicht gebleicht und gebügelt werden.

Bei weiterführenden Fragen zu Desinfektionsmöglichkeiten, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

## 9 Lagerung

Die aks-profiplot n darf nur sauber, trocken gelagert werden. Für Lagerungszwecke darf sie nicht gefaltet werden. Bewahren Sie die Verpackungsfolie zu Transport- und Lagerungszwecken auf.

Die Lagerungsbedingungen müssen folgende Werte erfüllen:

- Lagerungstemperatur von 10°C und 40°C
- Luftfeuchtigkeit von 20 % bis 75 %

Achten Sie darauf, dass die aks-profiplot n vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt wird.

### **Hinweis:**

Eine Stapelhöhe von max. 10 Stück darf nicht überschritten werden!

Auf der aks-profiplot n darf kein anderes Produkt gelagert werden, das die Matratze beschädigen könnte.

## 10 Wiedereinsatz

Die aks-profiplot n ist nur für den Wiedereinsatz vorgesehen, wenn ab dem Ersteinsatz die aks-profiplot n zusammen mit der optional erhältlichen aks-inkoair® Matratzenhülle verwendet wurde.

Vor dem Wiedereinsatz (z.B. bei einem Patientenwechsel) sind die Weichlagerungsmatratze, der Trikotbezug und die aks-inkoair® Matratzenhülle nach einem validiertem Verfahren aufzubereiten (Reinigung und Desinfektion) sowie anhand der Checkliste für den Wiedereinsatz (**siehe Kapitel 16**) zu prüfen.

## 11 Entsorgung

Die aks-profiplot n muss umweltfreundlich, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden. Beachten Sie diesbezüglich die Vorschriften Ihrer Gemeinde, die sich im Laufe der Zeit ändern können.

Beachten Sie, dass die Matratze, der Trikotbezug und aks-inkoair® Matratzenhülle (wenn optional angewendet) keimbehaftet sein kann und dies zu Infektionsübertragung führen kann. Treffen Sie adäquate hygienische Schutzmaßnahmen.

## 12 Lebensdauer

Die aks-profiplot n zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus. Diese ist aber von vielen Einflussfaktoren abhängig und ist daher von Fall zu Fall unterschiedlich.

## 13 Garantie

Die aks-profiplot n zeichnet sich durch Langlebigkeit und hohe Zuverlässigkeit aus. Sollten sich dennoch Probleme ergeben, setzen Sie sich mit Ihrem ortsansässigen Fachhändler in Verbindung. Dieser wird schnellstmöglich Abhilfe schaffen.

Für unsere aks-profiplot n übernehmen wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen die Garantie für einwandfreie Beschaffenheit. Auf Materialverschlechterungen, die sich darin äußern, dass die Matratze sich um mehr als 2 cm absenkt, z.B. durch Kuhlenbildung, gewähren wir gemäß unserer Garantiebestimmungen ab Kaufdatum eine Werksgarantie von 7 Jahren (Verschmutzung und normale Abnutzung begründen keine Garantieleistung).








**Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäßer Gebrauch, sowie Änderungen und Ergänzungen ohne Zustimmung der Firma aks, führen zum Erlöschen der Garantie und der Produkthaftung allgemein.**

## 14 Konformitätserklärung

Die Weichlagerungsmatratze aks-profiplot n entspricht den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG „Medizinprodukte“ unter Berücksichtigung der Änderungsrichtlinie 2007/47/EG. Es wurden die folgenden Standards angewendet:

- DIN EN ISO 10993-5: Biologische Beurteilung von Medizinprodukten - Teil 5: Prüfung auf In-vitro-Zytotoxizität (für die aks-inkoair® Matratzenhülle)

## 15 Technische Daten

aks-profiplot n	
Klassifizierung:	Medizinprodukt der Klasse I (gemäß der Richtlinie 93/42/EWG)
Klimatische Bedingungen:	- Umgebungstemperatur von 10 °C bis 40 °C - Luftfeuchtigkeit von 20 % bis 75 %
Matratze	
Abmessungen (B/L/H):	90 x 200 x 12 cm (Bestellnr.: 39055) 90 x 190 x 12 cm (Bestellnr.: 39101) 100 x 200 x 12 cm (Bestellnr.: 39102)
Gewicht:	ca. 6,7 kg (90 x 200 x 12 cm) ca. 6,5 kg (90 x 190 x 12 cm) ca. 7,3 kg (100 x 200 x 12 cm)
zulässiges Patientengewicht:	von 40 kg bis 135 kg
Material Matratzenkern:	Polyether Schaumstoff HR
Material Trikotbezug:	100 % Polyester
Raumgewicht:	38 kg/m <sup>3</sup> (netto)
Stauchhärte	3 KPa; 40 %
Garantie:	7 Jahre gegen Kuhlenbildung
Erläuterung der Symbole für aks-inkoair® Matratzenhülle (Option)	
	Gebrauchsanweisung beachten
	Waschtemperatur max. 95°C, normaler Prozess
	nicht bleichen
	nicht bügeln
	Trocknen im Wäschetrockner möglich Trocknen bei niedriger Temperatureinstellung
	professionelle Chemischreinigung
	Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.

Alle Teile und Daten unterliegen der ständigen Weiterentwicklung und können somit von den aufgeführten Angaben abweichen.

## 16 Checkliste für den Wiedereinsatz

Prüfung der Grundvoraussetzungen				
Zweckentsprechender Einsatz				
Gebrauchsanweisung vorhanden				
Prüfung der Matratze				
Verformung / Kuhlenbildung / Beschädigung				
Verschmutzung der Matratze				
Liegefläche unbeschädigt (keine Risse, Löcher, Verhärtungen etc.)				
Verschleiß, Abnutzung				
Prüfung des Trikotbezuges				
Trikotbezug ohne Beschädigungen (Risse, Löcher etc.)				
Reißverschluss des Trikotbezuges funktionsfähig				
Prüfung der aks-inkoair® Matratzenhülle (Option)				
Risse, Löcher, getrennte Nähte				
Verschmutzung				
Verschleiß, Abnutzung				
Reißverschluss funktionsfähig				
Etikett vorhanden und lesbar				
Gesamtbewertung				
Matratze in Ordnung	Datum	Firma	Prüfer	Unterschrift
JA	NEIN			

Bitte tragen Sie hier das Baujahr (Herstellungszeitraum) Ihrer aks-profiplot n ein:

**Baujahr:** \_\_\_\_\_

Bitte tragen Sie hier Rufnummer und Namen des Ansprechpartners Ihres Fachhändlers ein:

**Name:** \_\_\_\_\_

**Rufnummer:** \_\_\_\_\_

Notizen



**aks - aktuelle krankpflege systeme GmbH**

Antwerpener Straße 6

53842 Troisdorf

Tel.: 02241 / 9474-0

Fax.: 02241 / 9474-88

e-mail: [aks@aks.de](mailto:aks@aks.de)

web: <http://www.aks.de>